

现在介绍在评估中心考试用的耳内红外线探热器的操作方法

这个是电源键；这个是测温键

先按电源键一次，然后松开手。探热器会自动运行，屏幕会显示上一次量度结果；这个符号提醒你戴上耳套；横线表示电量；见到这个画面表示完成开机

用酒精消毒纸清洁测温头后，便可以戴上耳套

进行测温时，按轻按测温键，然后放开手，你会听到"必"一声，然后屏幕显示量度结果

完成测温后按下这键退出耳套，再用酒精消毒纸清洁测温头

最后按电源键直至关机

注意！开机时**不要**长按电源键，否则...

如果你开机时长按电源键，便会把探热器转为设定模式，F 代表华氏，C 代表摄氏。你要自行调校为摄氏

当见到 C，停止按电源键

本短片旨在介绍探热器一般使用方法，正确探热手法及程序应参考课程手册及向导师请教

完